

Krok 1:  
Odeberete zvířeti vzorek krve do plastové kapilárky o objemu 20 mikrolitrů, obr. 1



Obr. 1

Krok 2 :  
Po naplnění kapiláry krví odstraňte přebytečnou krev z konců kapiláry, obr. 2.



Obr. 2

Krok 3 :  
Vložte kapiláru do adaptéru MPA, obr. 3.



Obr. 3

Krok 4 :  
Zasuňte mikrokapilární adaptér do analyzátoru, obr. 4.



Obr. 4

Analyzátor nyní začíná měřit a během 40 vteřin zobrazí výsledek na displeji.

MPA adaptér je celosvětově patentově chráněn. Výrobce analyzátoru EXIGO, BOULE MEDICAL AB, SWEDEN.